

Hofmag

DRUG FREE – NON INVASIVE

TECHNISCHE INFORMATION
UND
BETRIEBSANLEITUNG

HOFMEIR
MAGNETICS
LIMITED



BETRIEBSANLEITUNG

GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR DEN HOFMAG

1. Schalten Sie den Hauptschalter ein. **1**
2. Der LED-Ring leuchtet auf, und drei hörbare „Piep“-Töne weisen auf das Einschalten hin. **3**
3. Alle 12 LEDs zeigen eine grüne Farbe an, wenn das Gerät bereit und in Standby-Modus ist.
4. Drücken Sie kurz den Startknopf. Das Gerät startet eine 30-minütige Sitzung. **4**
5. Stellen Sie die Behandlungsintensität ein, indem Sie den Intensitätsregler von 1 (niedrig) bis 12 (hoch) drehen. **5**
6. Anfangs ist der LED-Ring komplett grün. Alle fünf Minuten werden zwei LED-Lämpchen mit einem einzelnen „Piep“-Ton ausgeschaltet.
7. Nach 30 Minuten sind alle LED-Lämpchen rot. Das Gerät wird „piepen“ und stoppen.
8. Nach drei Minuten ist das Gerät automatisch wieder im Standby-Modus.
9. Das Gerät wird während der 30-minütigen Sitzung angehalten in dem Sie den blauen Startknopf kurz (weniger als eine Sekunde) während der Sitzung drücken.
10. Um die Sitzung erneut zu starten, drücken Sie den blauen Startknopf noch einmal kurz.
11. Wenn Sie die 30-minütige Sitzung frühzeitig beenden möchten, drücken Sie den blauen Startknopf und halten Sie ihn zwei bis drei Sekunden lang gedrückt.
12. Um eine neue 30-minütige Sitzung zu starten, kehren Sie zu Punkt 4 zurück.
13. Bevor Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, schalten Sie bitte den Hauptschalter aus.

GARANTIE

Der HOFMAG K7 hat eine 1 Jahre Garantie.

DAS HOFMAG GERÄT



1. Hauptschalter

2. Netzanschluss

3. LED Ring

4. Startknopf

5. Intensitäts Drehregler

6. Behandlungsschleufe

Zur Reinigung des äußeren Gehäuses und der Schleufe lauwarmes Wasser mit mildem Haushaltsreiniger verwenden. KEINE ANDEREN REINIGUNGSMITTEL VERWENDEN.

GEGENANZEIGEN FÜR DEN BEDIENER:

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE SCHWANGER SIND ODER GLAUBEN, DASS SIE SCHWANGER SEIN KÖNNTEN.

VERWENDEN SIE DAS GERÄT NICHT, WENN SIE EINEN HERZSCHRITTMACHER, EINE INSULINPUMPE ODER ANDERE ELEKTRONISCHE IMPLANTATE WIE PERMANENTE HÖRHILFEN ODER METALLIMPLANTATE WIE DRÄHTE UND METALLSTENTS HABEN.

GEGENANZEIGEN FÜR PATIENTEN:

NICHT BEI SCHWANGEREN TIEREN ODER DIREKT AUF METALLIMPLANTATEN ANWENDEN.

STELLEN SIE SICHER, dass die Behandlungsschlaufe, das Netzkabel und der Stecker intakt sind. Kontrollieren Sie die Spule vor dem Gebrauch, um sicherzustellen, dass die Isolierung nicht zerrissen, beschädigt oder durchtrennt ist, sodass das Kabel im Inneren frei liegt.

STELLEN SIE SICHER, dass das Gerät auf einer geeigneten, trockenen, ebenen und stabilen Oberfläche platziert wird und dass die Behandlungsschlaufe nicht übermäßig verlängert ist.

das Gerät **NICHT** fallenlassen. Das Gehäuse ist zwar haltbar, bedenken Sie jedoch, dass es hauptsächlich einen äußeren Schutz für die empfindliche Elektronik im Inneren bietet. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, kann dies Schäden im Inneren verursachen. Behandeln Sie das Gerät stets vorsichtig.

NICHT mit Wasser in Berührung bringen – lassen Sie das Gerät nicht nass werden.

KEINE Flüssigkeiten auf das geöffnete Gerät platzieren.

NUR für den vorgesehenen Zweck verwenden.

NICHT von ungeübten/unbefugten Mitarbeiter bedienen lassen, es sei denn, dies erfolgt unter der Anleitung eines ausgebildeten HOFMAG-Therapeuten.

NICHT innerhalb einer Reichweite von 50 cm von Kreditkarten, Autoschlüsseln, Hörgeräten, Mobiltelefonen und anderen elektronischen Geräten verwenden.

BEHANDLUNGSLEITFADEN

Bevor Sie eine Behandlung eines Tieres beginnen, beachten Sie bitte folgende Grundsätze:

- Behandlungsschlaufe nicht in der Nähe des Tieres auf den Boden legen, damit es nicht auf die Schlaufe steigen kann oder sie in das Maul nimmt
- Die Behandlungsschlaufe darf mit dem Tier direkt in Kontakt kommen
- Die Anwendung immer mit geringer Intensität starten, unterhalb der Schmerzgrenze des Tieres
- Für beste Ergebnisse werden 2 Anwendungen pro Tag empfohlen
- Zwischen 2 Anwendungen sollten mindestens 4 Stunden liegen
- Die maximale Anwendungsdauer pro behandelter Stelle sollte 30 Minuten betragen

Intensität einstellen:

- Die Intensität kann von 1 bis 12 reguliert werden.

Dauer:

- Die Grundeinstellung für die Anwendungsdauer beträgt 30 Minuten, die jederzeit unterbrochen werden kann.

Das Hofmag ist ein teures elektronisches Gerät, welches verantwortungsvoll benutzt werden muss.

Wenn das Hofmag nicht benützt wird, soll es mit dem Nummernschloss versperrt abgestellt werden, und nur befugte Personen sollen das Schloss öffnen können.

ZERTIFIKATIONEN

Für die Sicherheit der Patienten und Therapeuten wurde das Hofmag einer elektromagnetischen Kompatibilitäts Prüfung (EMC) nach folgenden EU Directives unterzogen:


1. Emmissions Test nach EU Richtlinie EN 61000 - 6 - 3 : 2011.
Zertifikat Nummer: TRA - 042983 - 36 - 01A
2. Immunity Test nach EU Richtlinie EN 61000 - 6 - 1 : 2007.
Zertifikat Nummer: TRA - 042983 - 36 - 02A

TECHNISCHE DATEN

- Die Technologie ist geschützt durch : International Patent Application Number WO 2019/097254 A1
- Impulsabgabe an Schlaufe: 600 bis 1600 Amps. 1.0 Millisekunde Impulsweite, gedämpft durch 28 kHz Sinusschwingung.
- Impulsrate: 6 Impuls-Schwingungen pro Sekunde (6Hz).
- Die Feldintensität ist über eine 12stufige Skala anpassbar.

Einstellung	Ampere	Einstellung	Ampere	Einstellung	Ampere
1.	600	5.	1000	9.	1400
2.	700	6.	1100	10.	1500
3.	800	7.	1200	11.	1550
4.	900	8.	1300	12.	1600

- Magnetische Output Leistung:

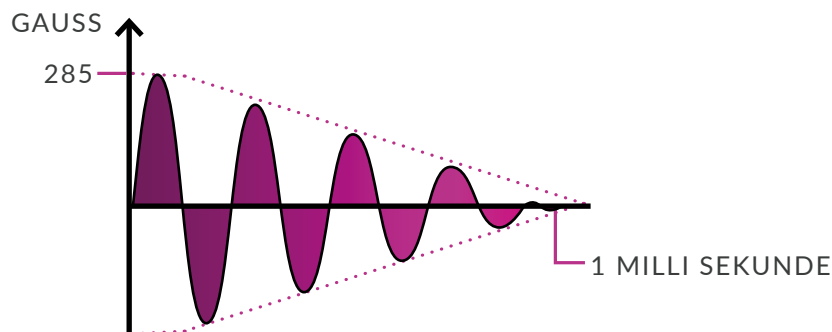

- (i) Jeder hörbare Tick ist 1 Impuls-Schwingung.
- (ii) Bei jeder Impuls-Schwingung oszilliert das Magnetische Feld eine Millisekunde (1/1000 Sekunde), beginnend mit 285 Gauss.

- Netzanschluss: 220Vac to 250Vac 1A 50Hz
- Sicherung: 3.15 Amp
- Stromverbrauch: 75W
- Schutzgrad: IP 54
- Gewicht inkl. Schlaufe: 16.0 Kg
- Abmessungen: 470mm x 355mm x 175mm

THERAPIE KRANKER ZELLEN

WAS EINE PEMF BEHANDLUNG FÜR KRANKE UND VERLETZTE ZELLEN TUT

Die HOFMAG stößt Prozesse in den organischen Zellen an, die bis vor kurzem nur unter Laborbedingungen möglich waren.

Der Prozess der Bioenergetik kann bis zu 20 cm tief in den Körper hinein angestoßen werden, was als „Elektroporation“ bekannt ist.

Die PEMF-Therapie ist die Anwendung pulsierender elektromagnetischer Felder, die durch Stimulierung der Zellmembran sowie Verbesserung der Zelldurchlässigkeit und -funktion wirken, was wiederum den allgemeinen Blutfluss und die Sauerstoffversorgung der Muskeln verbessert und den Heilungsprozess beschleunigt.

Es findet eine „Regeneration“ statt, was bedeutet, dass einige konventionell angewandte Korrekturmethode mit Medikamenten, Operationen oder langwierigen körperlichen Behandlungen möglicherweise überflüssig werden.

Die PEMF-Technologie hat ein enormes Zukunftspotenzial und ist eine nichtinvasive, sowie medikamenten- und risikofreie Behandlungsmethode.

Durch ihre Wirkungsweise und Funktion kann sie bei allen Formen von chronischen und akuten Entzündungen, Verschleißbereichen und den meisten Verletzungen, insbesondere im Sportbereich, eingesetzt werden.

Die PEMF-Technologie kann genauso effektiv sein, wenn sie an gesunden Zellen angewandt wird, und führt zu einer wesentlichen Leistungssteigerung.

Die Entwicklung von PEMF basierte auf den Erkenntnissen bedeutender Wissenschaftler des vergangenen Jahrhunderts wie Nikola Tesla, die entdeckten, dass hochfrequente Energieimpulse des Nano- und Mikrosekundspektrums auf einen Organismus Zellen und Zellhaufen regenerieren können. Die technische Umsetzung und Anerkennung dieser Entdeckungen war zu jener Zeit nicht möglich.

Erst durch das bahnbrechende neue Konzept und die Entwicklung von Geräten wie der HOFMAG wurde der klinische Einsatz von PEMF ermöglicht. Neueste Forschungen haben ergeben, dass die Zellen eine so starke Zellstruktur haben, dass die transmembrane interzelluläre Therapie mit viel höheren Energien durchführbar ist, als dies mit Geräten vor Einführung der HOFMAG möglich war.



HOFMEIR MAGNETICS
UK LIMITED.

01672 837 138
info@hofmagtherapy.com
www.hofmagtherapy.com

HOFMEIR MAGNETICS
Ges.m.b.H.

+43 664 4356934
s.rantner@hofmagtherapy.com
www.hofmagtherapy.com